

## **INSTRUKCJA KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ**

- Do przeprowadzenia kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną (autoklaw) stosuje się wskaźnik biologiczny (Sporal A – szczep *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953) umieszczony na pasku bibuły – należy pobrać z Biura Obsługi Klienta Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. 1 Maja 8.
- Użyte testy powinny mieć aktualną datę ważności.

### **SPOSÓB UŻYCIA TESTU**

- Umieścić wskaźniki testowe (Sporal A) w komorze autoklawu w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
- Wskaźniki powinny być opisane zgodnie z ich rozmieszczeniem, uwzględniając poziom umieszczonego testu (np. góra- dół).

### ***UWAGA! Nie wyjmować testu z opakowania papierowo- foliowego.***

- Przeprowadzić ustalony program sterylizacji.
- Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku, przechowywać je w temperaturze pokojowej i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do laboratorium z wypełnionym formularzem.

**Wskaźniki przyjmowane są od poniedziałku do czwartku do godziny 13:00.**